

ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ

- Zapněte analyzátor stlačením tlačítka na zadním panelu
- Pro vypnutí zmačkněte tlačítko nahoře vlevo

TYP VZORKU PRO cCRP, cPROG, T4, Cortisol a TSH

1. 100 μ L lithium-heparinová plazma
2. 100 μ L séra

IMPORT TYPU KAZETY / KALIBRAČNÍCH INFORMACÍ

- Použijte USB paměť která je přiložena v každém balení kazet a zasuněte ji do USB zásuvky v přístroji
- Na úvodní obrazovce vyberte
- Na obrazovce nastavení vyberte **Import cartridge types / calibration types** (Import typu kazety / kalibračních dat)
- Vyberte **Update Now** (aktualizovat nyní) - kalibrace je vyžadována pouze pro každé nové balení kazet

TYP VZORKU PRO TEST HESKA NU.Q®




1. 50 μ L EDTA plazma (odstředěna do jedné hodiny od odběru)

PŘÍPRAVA VZORKU PRO T4

1. Pipetujte 100 μ L vzorku do T4 zkumavky pro ředění
2. Ujistěte se že je vzorek dobře promíchán
3. Použijte 100 μ L naředěného vzorku pro T4 test

SPUŠTĚNÍ TESTU

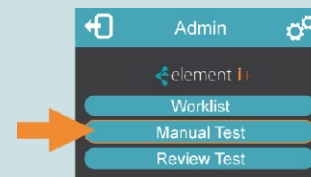

1. Klikněte na worklist nebo vyberte **Manual Test** (manuální test)
2. Zadejte informace o vzorku **Sample Info** (ID Pacienta, Druh, Typ testu, Typ vzorku)
3. Vyberte pro zpracování
4. Pipetujte požadované množství vzorku do kazety
5. Jakmile je test napipetován potvrďte
6. Vložte kazetu do testovacího slotu přístroje pro automatické spuštění testu

OPĚTOVNÝ TISK/PŘENOS VÝSLEDKŮ

- Vyberte **Review Test** (Přehled testů)
- Vyberte výsledky ze seznamu pro zobrazení
- Dotkněte se pro přenos

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

POPIS

ŘEŠENÍ

The inserted cartridge has already been run	Kazeta může být použita jen jednou
The inserted cartridge has expired	Pozor na expiraci, nepoužívejte expirované kazety
The inserted cartridge contains an invalid barcode	Čárový kód nebyl rozeznán, použijte novou kazetu
Unable to read the barcode from the inserted cartridge	Zkontrolujte zda není poškozen čárový kód a opětovně testujte. Pokud chyba přetrvává, použijte novou kazetu
The inserted cartridge is of an unknow test types	Naimportujte Typ kazety / Kalibrační Informace do analyzátoru
Worng cartridge inserted - Do you wish to proceed?	Upravte informace o vzorku označující typ vzorku tak, aby se shodoval s vloženou kazetou
Sample Flow Error	Sraženiny fibrinu ovlivňují měření - odstraňte sraženinu dřevěným aplikátorem - vyčištěný vzorek testujte s novou kazetou
Calibration information needed	Analyzátor vyžaduje informace o šarži kazety, naimportujte nová kalibrační data