

CryoPen® „b“ – kryokauter na veterinárne použitie

PRESNOSŤ, PRAKTICKOSŤ, RÝCHLOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Výnimočnosť kryopera vychádza z jednoduchosti a rýchlosti pri práci s týmto prístrojom. Primárne je určený na prácu v dermatológii, ale je možné ho využiť aj na jemné chirurgické zákroky napríklad v oblasti očí. Podstatou technológie je mimoriadne rýchle zmrazenie postihnutého tkaniva. Prístroj pracuje s plynovým patrónom (bombičkou) naplneným tekutým dusíkom.




CryoPen Vás určite osloví predovšetkým vďaka jeho presnosti, rýchlosti a bezpečnosti

Ošetrovanie trvá len niekoľko sekúnd, je bezbolestné a netvorí sa pluzgieriky. Aplikácia nevyžaduje sterilné prostredie a znecitlivenie. Po zákroku abscentuje krvácanie a pri bežnom ošetrovaní je riziko infekcie minimálne. CryoPen® „b“ ponúka 3 aplikátory, ktoré rozširujú možnosti jeho použitia aj na útvary s väčšou plochou.

Prúd vystupujúceho plynu je možné regulovať. Obsah bombičky s plynom je 23,5 gramov, čo postačuje na 300 sekúnd nepretržitej prevádzky.

Na ošetrovanie 1 mm do hĺbky stačí prúd po dobu 5 sekúnd apod.

Nespornou výhodou je ošetrovanie LEN POŠKODENÉHO TKANIVA bez zásahu do zdravej pokožky a okolia.

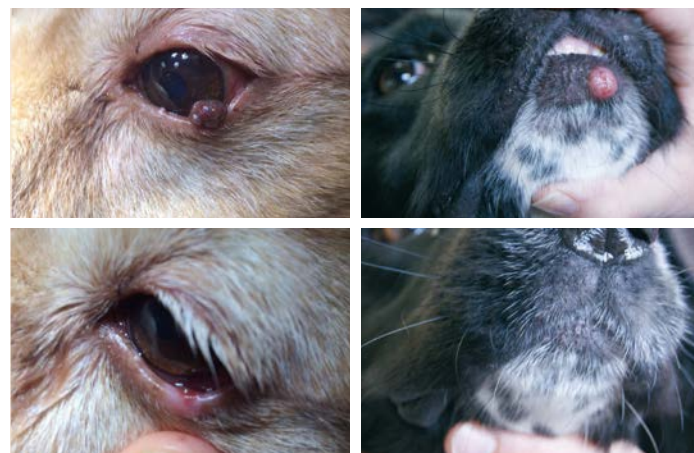

Primárnymi indikáciami sú: bradavice, papilómy, cysty, novotvary (adenómy) nie len na tlame, nose, viečkach, ušiach, vankúšikoch tlapiek, ale taktiež v perianálnej oblasti. Rýchle zmrazovanie tkaniva kryoperom CryoPen® „b“ trvá len pár sekúnd a na rozdiel od klasickej chirurgie nevyžaduje žiadnu narkózu, predchádzajúcu prípravu ani následnú liečbu.

Metóda je menej časovo náročná a vhodná aj na ošetrovanie starších zvierat, ktoré už majú problémy s pečňou, obličkami a srdcom a narkóza by ich mohla ohroziť na živote.

A ako sa s prístrojom pracuje? Cryopen smeruje tenký prúd kryogénnej tekutiny priamo na útvar, čo umožňuje jeho ošetrovanie s presnosťou na milimeter. Jednoducho nasadíte bombičku do prístroja, vyberiete vhodný aplikátor, nasmerujete a zamrazujete...

1 mm	5 sec
2 mm	10 sec
3 mm	15 sec
4 mm	20 sec
5 mm	25 sec

CryoPen® „b“ – kryokauter na veterinárne použitie

PRESNOSŤ, PRAKTICKOSŤ, RÝCHLOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Výhody použitia prístroja CryoPen® „b“:

- ošetrovanie je bezbolestné a nevyžaduje použitie anestézie a to ani lokálnej
- pri jeho použití nevzniká popálené miesto
- pri aplikácii necítíme pach „spálenej“ kože
- zvuk pri ošetrovaní je slabý a kontinuálny („neprská“, nedochádza k „výboju“)
- prístroj pracuje bez vzniku jaziev, čo je dôležité pri ošetrovaní genitálií, perianálnej oblasti, či ústnej dutiny
- prúd je možné pomocou vhodnej veľkosti trysky zamerať cielene, čo je vhodné pri ošetrovaní v blízkosti oka pri ošetrovaní chlповého folikulu rias
- pri odstraňovaní zhubných buniek nehrozí ich „rozrezanie“ a šírenie napr. krvou
- prístroj i bombičky sú malé a nevyžadujú špeciálny priestor ani zaobchádzanie
- výkon CryoPen® „b“ je výrazne vyšší a dlhší
- je možná výmena trysky pri už nasadenom patrónu (bombičke)

Pozrite si videá. Zistíte, ako ľahko je možné túto inovatívnu technológiu zaviesť do Vašej každodennej praxe:



Na spustenie videa použite tento QR kód.



Na spustenie videa použite tento QR kód.



Gold dot	Silver dot	Bronze dot
● ø 1-4 mm	● ø 2-8 mm	● ø 4-12 mm
Power: █	Power: █ █	Power: █ █ █

Ďalšie videá: www.ho-equipments.com