

CryoPen B+ - kryokauter

Výměna bombičky

1. Vypusťte nespotřebovaný plyn odšroubováním aplikátoru a stisknutím tlačítka (a). Poté odšroubujte bombičku a nezakrývejte přitom rukou otvor (b) pro vypouštění plynu vedle spouštěcího tlačítka. Odšroubujte a zahodte použitou bombičku. Zkontrolujte, zda je dutina prázdná. Během nasazování narážecího trokaru a bobičky je nutné držet Cryopen (c) **ve vertikální pozici !!**




2. Zkontrolujte, že dutina přístroje **neobsahuje žádné nečistoty**.

Otevřete blistr a **vyjměte filtr/otvírač pinzetou**.

Držte přístroj CryoPen/CryoProbe špičkou dolů.

Vložte filtr do přístroje a **přesvědčte se, že leží naplocho na dně dutiny přístroje**.

Trokar na otvírači musí mířit vzhůru!!

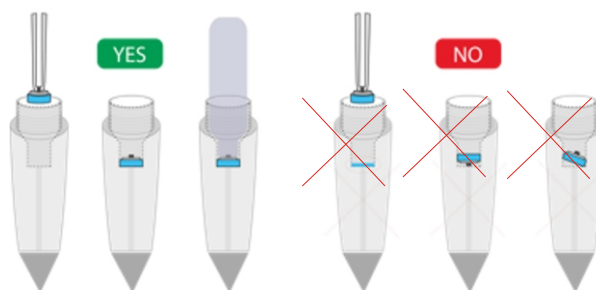

4. Vložte bombičku do dutiny přístroje CryoPen.

Začněte jí šroubovat po směru hodinových ručiček, až dokud neucítíte, že se **filtr/otvírač a bombička vzájemně dotýkají**.



5. Umístěte ruce tak, aby bylo možné provést poslední otočení bombičkou (do plného dotažení těsnosti ručním šroubováním) rychlým a nepřerušovaným pohybem. Uslyšíte krátký syčivý zvuk. Čím kratší bude, tím lépe.



Výdrž bombiček s aplikátory

Aplikátor	23 g
Bílá/zlatá	375-400 s
Bílá/stříbrná	200-250 s
Bílá/bronzová	150-170 s

Pro dosažení optimálního využití bombičky neprovádějte aplikaci pod úhlem ostřejším než 45°.

